

TTcare 100+

手機保養機

專業植牙手機保養功能

亮眼的設計，出色的表現



技術資料

型號	TTcare 100+	
產品代碼	08090012	
尺寸	W295 X D295 X H385 mm	
重量	9 kg/ 19.85 lbs	
電氣評級	100- 230V, 50-60Hz, 60W	
保護等級	I	
環境溫度	5-40°C(41-104°F)	
分貝	<60 (65) dB (A)	
相對濕度	max. 85%	
壓縮空氣	4-6 bar (58-87 ps)	
耗氣量	40 NL/min	
壓縮空氣品質	殘餘含油量	max. 0.1 mg/ m ³
	殘餘灰塵	max. 1 µm; max.1 mg/ m ³
	殘餘水	max. 0.1 g/ m ³ at -40°C (-40°F)

簡便操作

TTcare100+具備人性化的使用介面與設計，提供優質的牙科手機護理過程，將清洗牙科手機的程序簡單化，並可同時自動清洗維護三支手機，且每支手機的維護時間僅需15秒，節省時間及金錢。

小細節成就大不同

專屬於TTcare100+設計的小細節：LED螢幕顯示、前門快拆設計、專用筒夾清潔保養系統、簡易的潤滑油罐更換設計、馬達驅動設計等，突顯雷虎保養機的功能及特性，大幅提升使用者的操作經驗。

保養機特色

- LED螢幕顯示
- 可同時自動清洗保養三支手機，每支手機的維護時間僅需15秒
- 獨特的夾具 (chuck) 保養系統
- 應用潤滑油泡沫噴罐方式進行清理
- 使用雷虎油罐加強潤滑與保養結果
- 保持每次保養品質的一致性
- 簡易的潤滑油罐更換
- 潤滑油罐的接合處為獨特安全閥
- 吸油孔與油槽抽屜設計，吸收殘油
- 快拆前門設計，利於日後清潔保養機內部與前門上的殘油
- 可在無壓縮空氣下進行清潔過程 <限Contra angle handpiece>
- 程式控制之主動式潤滑系統，將有效且具有清潔效果之潤滑油傳送到內部的所有元件，最高可保養3支植牙手機(選配)，讓運行過程穩定又有效率



具高效清潔與潤滑的德製保養油

產品代碼：08090011



獨特的夾具 (CHUCK) 保養系統

- 1 將夾具放置到夾具保養接口
- 2 按下開關鈕，啟動保養程序
- 3 自動清潔及保養手機夾持系統

易拆易洗面版設計

簡易的快拆設計，可將前門與保養機單獨分離，以利於日後進行保養機內部與前門的清潔，讓使用者毫不費力，隨時隨地的將保養機保持於良好的狀態。



精巧負壓系統，油氣不殘留

利用精巧的負壓系統清理多餘殘油，並藉由吸油孔將殘油排到保養機底下的油槽抽屜。



快速保養油換裝系統

簡易的潤滑油罐更換設計。



簡單的操作保養

- 1 拉開下門
拿一、二或三支手機連接上固定接口。
- 2 關門。
- 3 按下相對應的按鈕來啟動內部自動化的清潔與護理。
- 4 保養時間僅需要15秒 (最短)。



主動式潤滑系統特色

- 最佳化的全面潤滑：程式控制之主動式潤滑系統，將有效且具有清潔效果之潤滑油傳送到內部的所有元件，最高可保養3支植牙手機(選配)，特別適合彎機與植牙手機的保養。
- 可靠與選用彈性：平穩的馬達透過皮帶傳動，提供安靜、順暢、無震動的操作過程，可依照需求增加或減少驅動接口(Driven port)。(選配)

選配零件和耗品

圖示	說明	料號	圖示	說明	料號
	KaVo 快速接頭	OPL0345		Star 快速接頭	OPL0413
	W&H 快速接頭	OPL0346		Midwest 快速接頭	OPL0551
	NSK 快速接頭	OPL0344		Midwest CA 快速接頭	OPL0583
	Bien-Air 快速接頭	OPL0348		Borden 快速接頭	OPL0110
	SIRONA 快速接頭	OPL0347		泡殼	OPL0350
	E-Type 快速接頭	OPL0349		吸油棉	OPL0351